




Installatie en gebruik van de hear-WHO spraak-in-ruis screening zelftest

U kan de [hear-WHO](#) app via deze [link](#) of via deze QR-code, gratis installeren en gebruiken op zowel iOS als Android smartphones. Na installatie zal de app in het Engels werken, maar kan je kiezen voor Nederlands, Engels, Portugees, Spaans, Russisch of Chinees. Voor Frans gebruik je de [Höra app](#) van de Fondation Pour l'Audition. Door middel van een smartphone en oortjes kan uw patiënt deze zelftest uitvoeren. Eerst wordt nagegaan of het voldoende stil is. Dan kan de patiënt de luidheid aanpassen, zodat de cijfers goed hoorbaar zijn, en na een korte inleiding start de test. Er worden 23 reeksen van drie cijfers in ruis aangeboden, die de patiënt typt op een klavier en nadien bevestigt met “OK”.

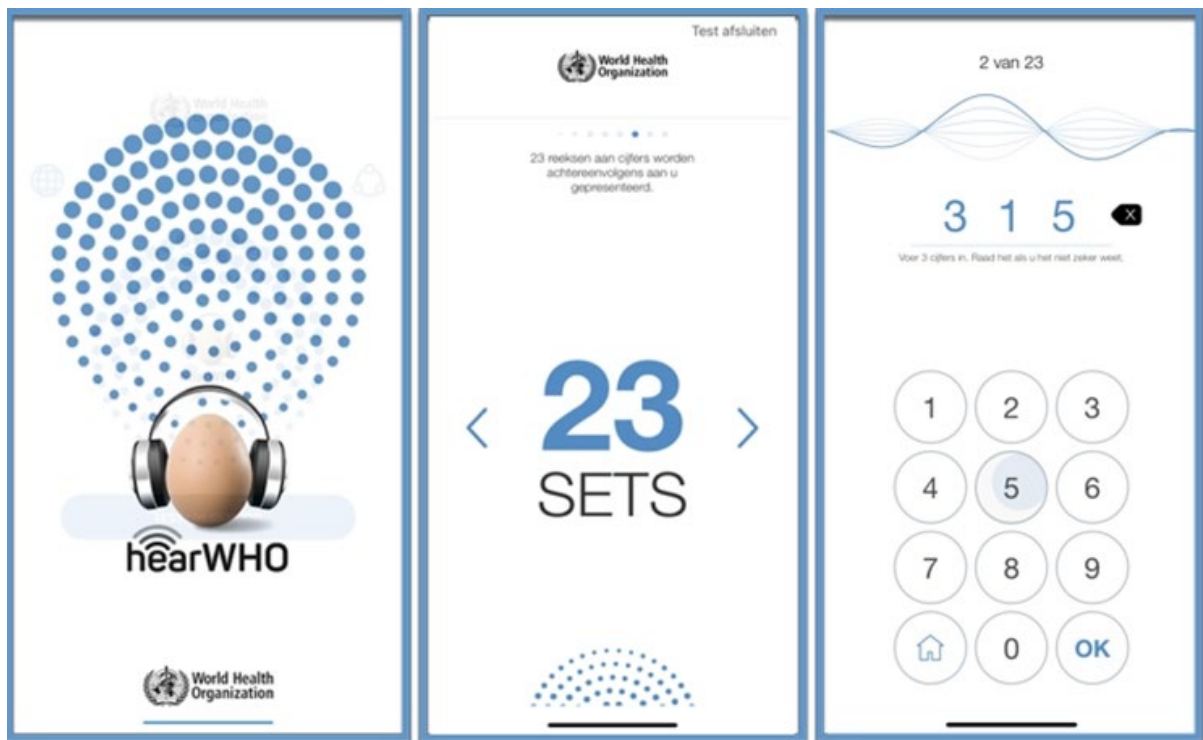

Interpretatie van de hear-WHO spraak-in-ruis screening zelftest

Dit zal een score opleveren (tussen 0 en 100) die u kan helpen bij de beslissing om uw patiënt wel of nog niet door te verwijzen voor verder onderzoek.

- Als de score lager is dan 50: Het is waarschijnlijk dat er een zekere mate van gehoorverlies is, hoe lager de score, hoe groter het gehoorverlies. U dient het gehoor te laten testen door een NKO-arts of door een audioloog in een hoorcentrum.
- Als de score tussen de 50 en 70 ligt: Dient het gehoor regelmatig getest te worden, om te zien of de score verder afneemt. Dat kan met deze test, door een NKO-arts of door een audioloog in een hoorcentrum.
- Als de score hoger is dan 70: Dan is er waarschijnlijk een goed gehoor en is verdere verwijzing niet noodzakelijk.